



Nada melhor do que ver
com seus próprios olhos...

 **smith&nephew**
OPSITE[®]
POST-OP VISIBLE

Curativo impermeável à água
e bactérias que permite
visualização da incisão

Proteja a incisão cirúrgica da invasão de bactérias

Abra os seus olhos para um curativo à prova de bactérias¹, absorvente^{2,3}, que permite clara visualização através da incisão cirúrgica

Proteção contra Infecção


- O exclusivo filme do OPSITE[®] Post-Op Visible é impermeável a bactérias e protege a incisão cirúrgica de contaminação externa. A alta permeabilidade do filme ajuda a manter o sítio cirúrgico seco^{2,3} e mantém o curativo no local

Visibilidade

- A estrutura da espuma hidrocélular é absorvente e permite a visualização da incisão cirúrgica^{2,3}, facilitando a identificação dos sinais de infecção

Ambiente Adequado para Cicatrização

- A alta permeabilidade do filme permite evaporação do excesso de fluido da incisão cirúrgica e ajuda a promover seu fechamento^{2,3}
- OPSITE[®] Post-Op Visible maneja mais exsudato e é mais absorvente que os curativos pós-operatórios tradicionais^{2,3}

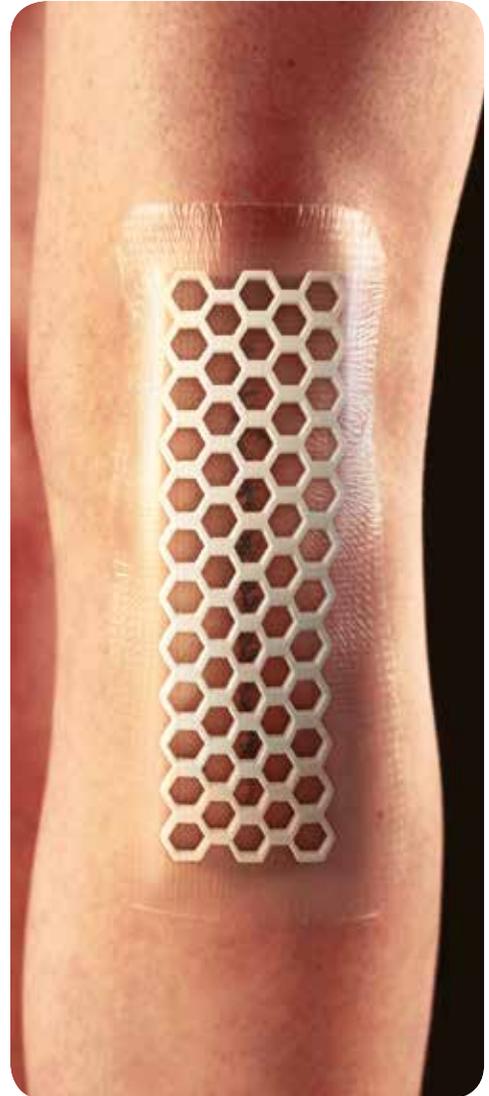

Principais características

OPSITE[®] Post-Op Visible foi desenvolvido para incisões pós operatórias, lacerações, cortes, abrasões e pequenas queimaduras, com exsudato baixo a moderado

Veja através da estrutura de espuma hidrocélular

Permite monitorar o progresso da incisão sem retirar o curativo ou manipular o sítio cirúrgico, enquanto minimiza o risco de contaminação. A estrutura absorvente da espuma maneja o exsudato e indica o momento de trocar o curativo

Alta permeabilidade (MVTR)^{2,3}

O filme tem uma exclusiva estrutura molecular que promove um alto MVTR (taxa de transmissão de vapor úmido), permitindo que a umidade indesejada evapore

Filme à prova d'água^{2,3}


Permite que o paciente se banhe com o curativo no local

Barreira bacteriana¹

Quando o curativo está intacto, o filme é impermeável a bactérias e protege o sítio cirúrgico contra contaminação externa

Confortável e conformável

O design exclusivo do curativo garante conforto, facilidade de aplicação e remoção

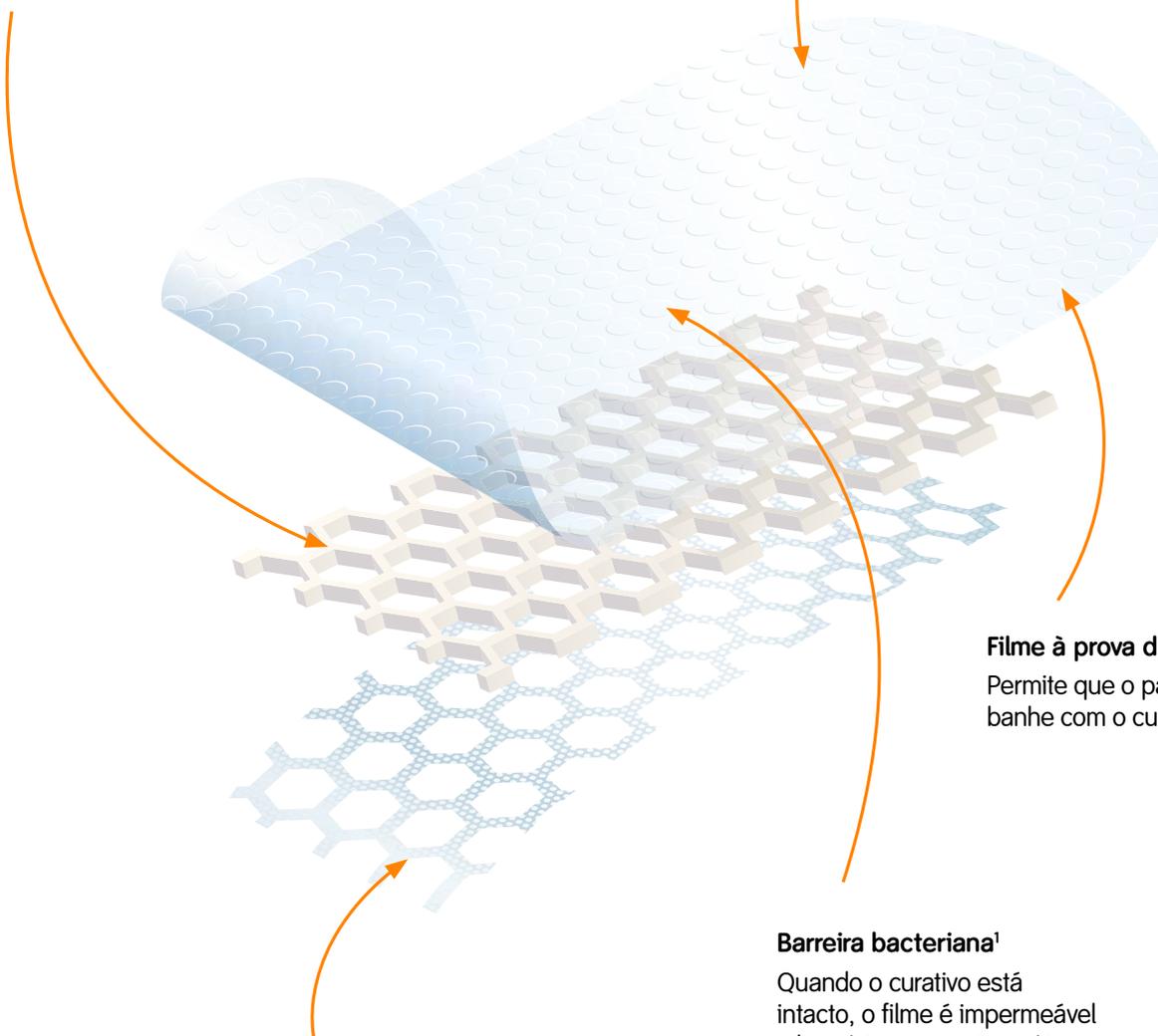

Aplicação OPSITE[◇] Post-Op Visible



Remova o papel siliconado com o número 1



Segurando nas abas não adesivas, posicione o curativo sobre a incisão cirúrgica



Aplique leve pressão, especialmente nas bordas do curativo



Remova o papel superior com o número 2



1. Levante uma das pontas do curativo
2. Puxe o filme paralelamente à pele do paciente
3. Libere
4. Repita por toda a borda do curativo

OPSITE[◇] Post-Op Visible Drain

OPSITE[◇] Post-Op Visible Drain é um curativo pós-operatório projetado para uso com drenos, com as mesmas características e vantagens do OPSITE[◇] Post-Op Visible. Apresenta fenestra centralizada para facilitar a colocação ao redor do dreno, permitindo uma colocação fácil e segura.



Destaque as duas tiras de segurança do curativo. Guarde-as em local limpo e seco para serem utilizadas nos passos finais



Remova o papel protetor e centralize o curativo sobre o local de inserção do dreno. Posicione o curativo de forma que o dreno permaneça na abertura central do curativo. Fixe o curativo na pele ao redor do sítio de inserção do dreno.



Remova os papéis remanescentes da fenestra e posicione de forma que fiquem alinhados. Pressione o filme contra a pele para aderir.



Remova o papel transparente de número 2 pela borda não adesiva. Segure o dreno com a outra mão.




Separe as duas tiras de segurança. Remova o papel protetor de uma das tiras e aplique sobre a abertura do curativo, fixando a parte superior da tira na parte inferior do dreno. Remova o papel protetor.




Aplique a segunda tira de filme horizontalmente sobre o dreno aderindo na outra tira, protegendo e estabilizando desta forma o dreno. Remova o papel transparente.

Quando trocar?

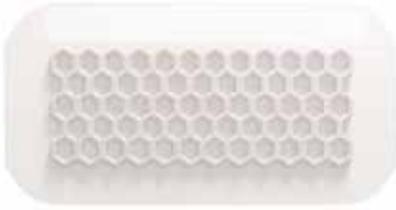

Não necessita de troca

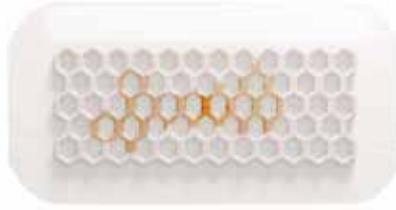

Não necessita de troca
(Saturação moderada)



Necessita de troca

Códigos disponíveis

Código	Tamanho	Quantidade por caixa
66800136	10cm x 8cm	20
66800137	15cm x 10cm	20
66800138	20cm x 10cm	20
66800139	25cm x 10cm	20
66800140	30cm x 10cm	20
66800141	35cm x 10cm	20
66800842	9cm x 10cm	20

www.opsite.com

Referências:

1. Dados em Arquivo: Rpt No. WRP-TW042-361. Bacterial Barrier testing of OPSITE® Post-Op dressings against MRSA, 2007.
2. Dados em Arquivo: Rpt No. DS/07/209/R1. OPSITE® Post-Op Visible, Evaluation of PQ Samples, 2007.
3. Dados em Arquivo: Rpt No. DS/07/115/R20a. OPSITE® Post-Op Visible Dressing Physical Properties, 2008.

Cuidado Avançado de Feridas
Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda
sac.brasil@smith-nephew.com
Brasil

T +55 (11) 5070 9100
F + 55 (11) 5070 9199
www.smith-nephew.com

®Marca Registrada da Smith & Nephew
@Smith & Nephew
Distribuído de Novembro de 2015 a Novembro de 2017